


Szelki Bawełniane 25060

Specyfikacja

Materiał: Poliester (Trevira)
Krawędzie: Poliester
Max. Obciążenie: 180 kg
Rozmiary: JM, S, M, L, XL
Pranie: patrz ulotka na szelkach

Opcjonalnie: czteropunktowy pas do podwieszania 21126

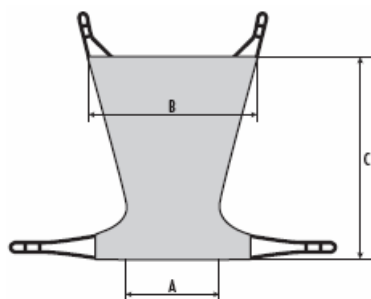


Rozmiar		Kolor	A	B	C
JM	Dziecięcy, średni	Szary	36	75	90
S	Mały	Czerwony	36	75	100
M	Średni	Żółty	48	85	110
L	Duży	Zielony	56	95	115
XL	Bardzo duży	Niebieski	64	105	120



REHA Błoch • ul. Lermontowa 3, 60-461 Poznań • tel/fax: 61 842 35 46
e-mail: biuro@rehabloch.pl • www.rehabloch.pl



Szelki Komfortowe 25060

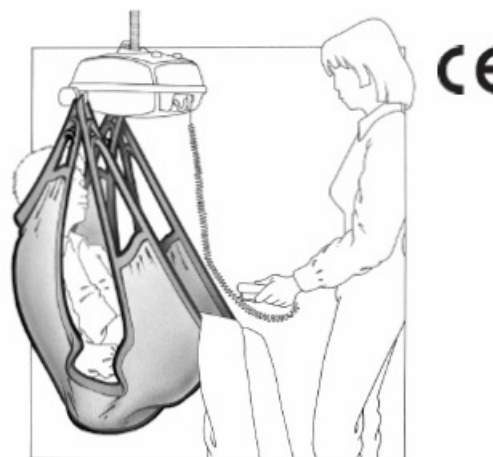

Szelki Human Care 25060 ma niedzielone wsparcie dla nóg. Szelki te mogą być zakładane tylko i wyłącznie w pozycji leżącej


25060 zostały wyprodukowane z bawełnopodobnego poliestru o wysokim współczynniku tarcia. Dzięki tarcu jakie wywołują, stabilnie trzymają się między pacjentem a siedziskiem.

25060 zostały zaprojektowane dla dwupunktowego systemu zawieszenia. Czteropunktowe zawieszenie możliwe jest tylko przy współpracy z Pasem 21126.

WAŻNE!

⚠ Podnoszenie i przemieszczanie pacjenta zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego też należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zarówno procedur podnoszenia, jak i sprzętu do podnoszenia. Należy się zawsze upewnić, że używa się właściwego sprzętu do podnoszenia w celu ułatwienia poszczególnych procedur podnoszenia. Opiekun/pielęgniarka są zawsze odpowiedzialni za bezpieczeństwo pacjentów, którymi się zajmują i muszą być świadomi zdolności swoich pacjentów do poradzenia sobie z całą „sytuacją podnoszenia”. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą.

Zakładanie szelek w pozycji leżącej

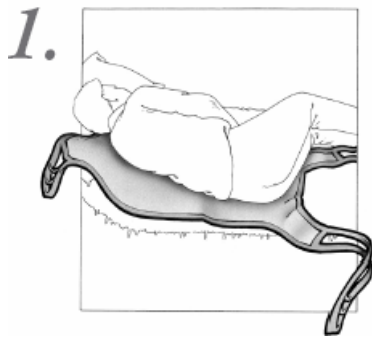

Pacjenta położyć na boku. Środek szelek umieścić w linii kręgosłupa. Zwrócić uwagę na metkę, która jest umieszczona na szelkach (powinna być na zewnątrz). Dolny koniec szelek powinien być umieszczony przy kości ogonowej. Obróć pacjenta na drugą stronę i wyciągnij szelki. Połóż pacjenta na plecach.


Jeżeli łóżko ma regulację oparcia, to ustaw je w pozycji nachylonej.



Obniż kasetę do poziomu brzucha. Zahacz obydwie paski tylnej części oraz części nożnej na tylnych hakach kasety. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.

Alternatywa: Szelki można również używać z czteropunktowym systemem zawieszenia. W takim przypadku Pas do podwieszania Human Care zawieszony jest na haki z przodu kasety.

Zakładanie szelek w pozycji siedzącej

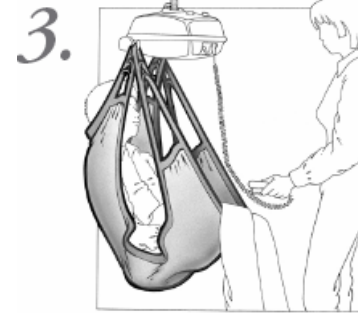

Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.



Wznów podnoszenie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nieznacznie opuścić łóżko. Delikatnie podnieś nogi pacjenta podczas ponoszenia go z łóżka. Obejmij pacjenta, aby czuł się bezpieczniej w trakcie podnoszenia.

Na obrazku przedstawiony jest czteropunktowy system zawieszenia przy użyciu Pasa Human Care 21126.