


Szelki Bawełniane 25065

Specyfikacja

Materiał: Poliester (Trevira)
 Krawędzie: Poliester
 Max. Obciążenie: 250 kg
 Rozmiary: S, M, L, XL
 Pranie: patrz ulotka na szelkach


Opcjonalnie: czteropunktowy pas do podwieszania 21126

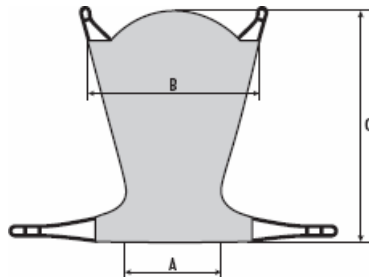

Rozmiar	Kolor	A	B	C
S Mały	Czerwony	36	75	121
M Średni	Żółty	48	85	133
L Duży	Zielony	56	95	139
XL Bardzo duży	Niebieski	64	105	145



Szelki Komfortowe Wysokie 25065

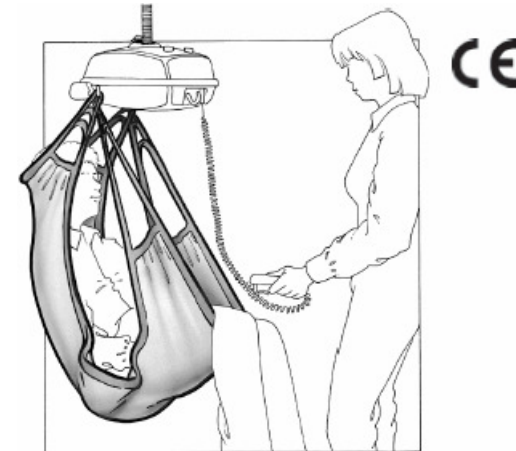

Szelki Human Care 25065 mają wysokie oparcie obejmujące głowę oraz niedzielone wsparcie dla nóg. Szelki te mogą być zakładane tylko i wyłącznie w pozycji leżącej

25065 zostały wyprodukowane z bawełnopodobnego poliestru o wysokim współczynniku tarcia. Dzięki tarcu jakie wywołują, stabilnie trzymają się między pacjentem a siedziskiem.


25065 zostały zaprojektowane dla dwupunktowego systemu zawieszania. Czteropunktowe zawieszenie możliwe jest tylko przy współpracy z Pasem 21126.

WAŻNE!

⚠ Podnoszenie i przemieszczanie pacjenta zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego też należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zarówno procedur podnoszenia, jak i sprzętu do podnoszenia. Należy się zawsze upewnić, że używa się właściwego sprzętu do podnoszenia w celu ułatwienia poszczególnych procedur podnoszenia. Opiekun/pielęgniarka są zawsze odpowiedzialni za bezpieczeństwo pacjentów, którymi się zajmują i muszą być świadomi zdolności swoich pacjentów do poradzenia sobie z całą „sytuacją podnoszenia”. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą.




Zakładanie szelek w pozycji leżącej

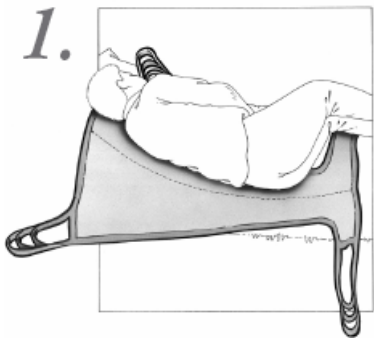

Pacjenta połóż na boku. Środek szelek umieść w linii kręgosłupa. Zwrócić uwagę na metkę, która jest umieszczona na szelkach (powinna być na zewnątrz). Dolny koniec szelek powinien być umieszczony przy kości ogonowej. Obróć pacjenta na drugą stronę i wyciągnij szelki. Połóż pacjenta na plecach.


Jeżeli łóżko ma regulacje oparcia, to ustaw je w pozycji nachylonej.

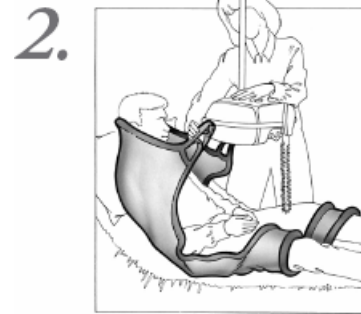


Obniż kasetę do poziomu brzucha. Zahacz obydwie paski tylnej części oraz części nożnej na tylnych hakach kasety. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.

Alternatywa: Szelki można również używać z czteropunktowym systemem zawieszenia. W takim przypadku Pas do podwieszania Human Care zawieszony jest na haku z przodu kasety.

Zakładanie szelek w pozycji siedzącej

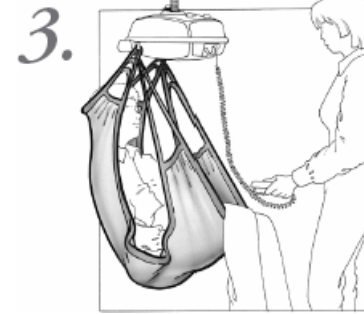

Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.

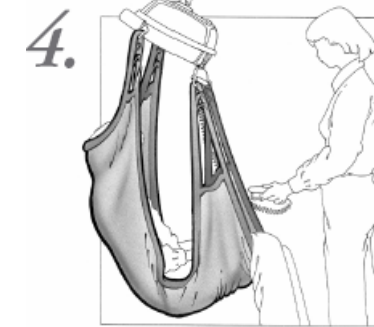

Wznów podnoszenie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nieznacznie opuść łóżko. Delikatnie przytrzymaj nogi pacjenta podczas ponoszenia go z łóżka. Obejmij pacjenta, aby czuł się bezpieczniej w trakcie podnoszenia.

Na obrazku przedstawiony jest czteropunktowy system zawieszenia przy użyciu Pasa Human Care 21126.