

Szelki Toaletowe 25080

Specyfikacja

Materiał: Poliester
 Krawędzie: Poliester
 Max. Obciążenie: 250 kg
 Rozmiary: JS, JM, S, M, L, XL
 Pranie: patrz ulotka na szelkach


Dodatkowo: pas na klatkę piersiową 25145 / 25146

Szelki Toaletowe 25085

Specyfikacja

Materiał: Siatka Poliesterowa
 Krawędzie: Poliester
 Max. Obciążenie: 180 kg
 Rozmiary: S, M, L, XL
 Pranie: patrz ulotka na szelkach

Dodatkowo: pas na klatkę piersiową 25145 / 25146

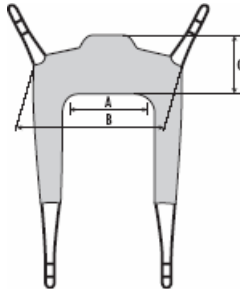

Rozmiar	Kolor	A	B	C
JS Dziecięcy, mały	Liliowy	28	62	22
JM Dziecięcy, średni	Szary	30	69	26
S Mały	Czerwony	35	75	30
M Średni	Żółty	50	87	33
L Duży	Zielony	55	94	33
XL Bardzo duży	Niebieski	61	100	37




REHA Błoch • ul. Lermontowa 3, 60-461 Poznań • tel/fax: 61 842 35 46
 e-mail: biuro@rehabloch.pl • www.rehabloch.pl



Szelki Toaletowe Plus 25080

Szelki Toaletowe Plus Siatka 25085

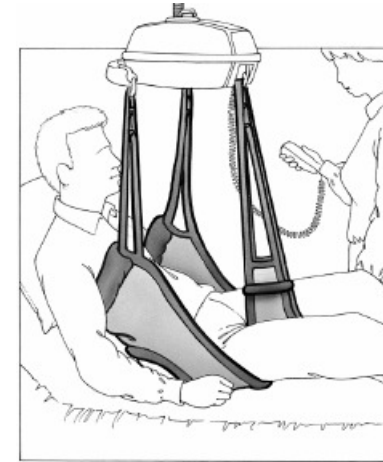

CE

Szelki Toaletowe Human Care Plus 25080 oraz Szelki Toaletowe Human Care Plus Siatka 25085 są przeznaczone do użytku toaletowego. Szelki te mają wzmocnione oparcie i podszyte pod ramionami. 25080 oraz 25085 mogą być także używane do przenoszenia osób do wózków inwalidzkich oraz foteli.



Na życzenie dla szelek 25145 może być dostarczony Pas na klatkę piersiową 25145 / 25146.

Szelki 25080 oraz 25085 są skonstruowane dla dwupunktowego oraz trójpunktowego systemu zawieszania.

WAŻNE!

⚠ Podnoszenie i przemieszczanie pacjenta zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego też należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zarówno procedur podnoszenia, jak i sprzętu do podnoszenia. Należy się zawsze upewnić, że używa się właściwego sprzętu do podnoszenia w celu ułatwienia poszczególnych procedur podnoszenia. Opiekun/pielęgniarka są zawsze odpowiedzialni za bezpieczeństwo pacjentów, którymi się zajmują i muszą być świadomi zdolności swoich pacjentów do poradzenia sobie z całą „sytuacją podnoszenia”. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą.



Zakładanie szelek w pozycji leżącej

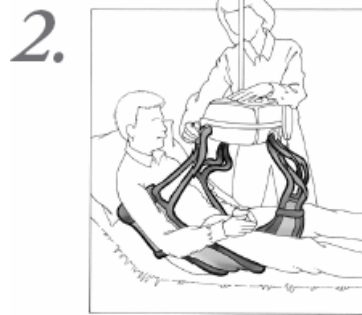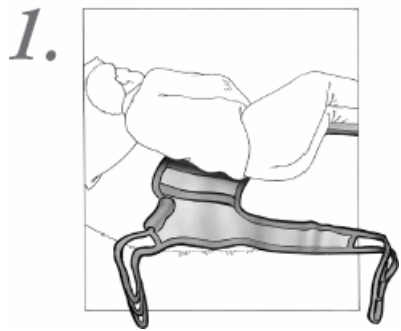

Pacjenta połóż na boku. Środek szelek umieść w linii kręgosłupa. Zwrócić uwagę na metkę, która jest umieszczona na szelkach (powinna być na zewnątrz). Obróć pacjenta na drugą stronę i wyciągnij szelki. Połóż pacjenta na plecach. Jeżeli łóżko ma regulację oparcia, to ustaw je w pozycji nachylonej.

Podciągnij części nożne pomiędzy nogi. Jeżeli pacjent chce się udać do toalety, rozepnij mu spodnie. Obniż kasetę do poziomu brzucha. Możesz poprowadzić lewe części nożne przez paski na zewnątrz prawej części nożnej. Zahacz paski podnoszące nożne na przednim haku kasety. Obróć kasetę i zahacz paski podnoszące tylne na hakach z tyłu kasety. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.


Alternatywa: Szelki można również używać z dwupunktowym systemem zawieszenia. W takim przypadku pasek zewnętrzny prawej części nożnej nie jest używany. Części nożne zostają w takim wypadku skrzyżowane.

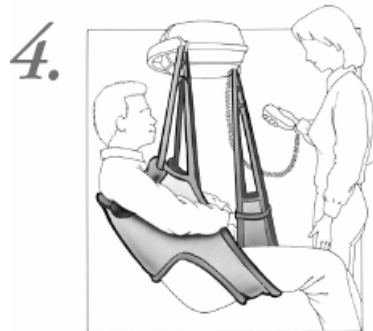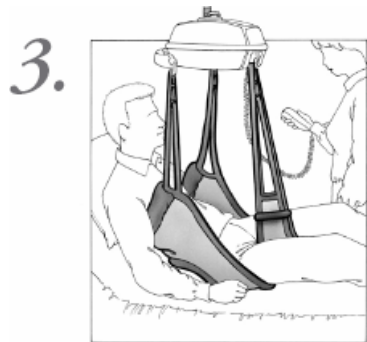

Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.

Wznów podnoszenie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nieznacznie opuść łóżko. Delikatnie przytrzymaj nogi pacjenta podczas podnoszenia go z łóżka. Jeżeli pacjent korzysta z toalety, to opuść mu spodnie tak nisko jak tylko się da i delikatnie osadź go na siedzisku. Opuść kasetę do poziomu brzucha i odepnij części nożne. Podnieś kasetę ponad głowę pacjenta i zdejmij mu spodnie.

Zakładanie szelek w pozycji siedzącej

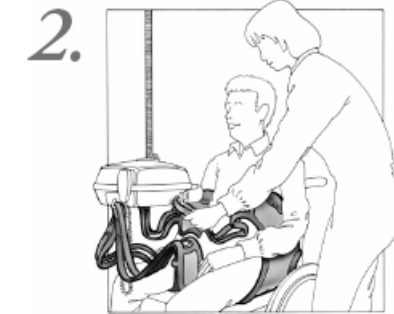

Umieść szelki za plecami pacjenta. Zwróć uwagę na metkę, która jest umieszczona na szelkach (powinna być na zewnątrz). Wyciągnij części nożne

Podciągnij części nożne pomiędzy nogi. Obniż kasetę do poziomu brzucha. Możesz poprowadzić lewe części nożne przez paski na zewnątrz prawej części nożnej. Zahacz paski podnoszące nożne na przednim haku kasety. Obróć kasetę i zahacz paski podnoszące tylne na hakach z tyłu kasety. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.

Alternatywa: Szelki można również używać z dwupunktowym systemem zawieszenia. W takim przypadku pasek zewnętrzny prawej części nożnej nie jest używany. Części nożne zostają w takim wypadku skrzyżowane.



Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.

Wznów podnoszenie. Upewnij się, że nogi pacjenta nie wyslizgują się. Podczas przemieszczania obejmij pacjenta tak, aby czuł się bezpieczniej. Jeżeli pacjent chce udać się do toalety, to postępuj zgodnie z instrukcją dla zakładania szelek w pozycji leżącej.