

Szelki Toaletowe 25090


Specyfikacja

Materiał: Siatka Poliestrowa
 Krawędzie: Poliester
 Max. Obciążenie: 250 kg
 Rozmiary: S, M, L
 Pranie: patrz ulotka na szelkach

Dodatkowo: pas na klatkę piersiową 25145 / 25146



Istnieje możliwość regulacji oparcia głowy poprzez wyginanie poduszki.

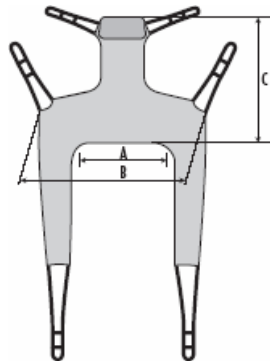

Rozmiar	Kolor	A	B	C
S Mały	Czerwony	35	75	73
M Średni	Żółty	50	87	80
L Duży	Zielony	55	94	88



REHA Błoch • ul. Lermontowa 3, 60-461 Poznań • tel/fax: 61 842 35 46
 e-mail: biuro@rehabloch.pl • www.rehabloch.pl



Szelki Toaletowe Wysokie 25090



CE

Szelki Toaletowe Human Care Wysokie 25090 z podparciem głowy przeznaczone są do użytku toaletowego. Szelki te mają wzmocnione oparcie i podszytie pod ramionami. 25090 mogą być także używane do przenoszenia osób na wózki inwalidzkie oraz fotele.



Na życzenie może być dostarczony Pas na klatkę piersiową 25145 / 25146.

Szelki 25090 są skonstruowane dla dwupunktowego oraz trójpunktowego systemu zawieszenia.

WAŻNE!

⚠ Podnoszenie i przemieszczanie pacjenta zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego też należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zarówno procedur podnoszenia, jak i sprzętu do podnoszenia. Należy się zawsze upewnić, że używa się właściwego sprzętu do podnoszenia w celu ułatwienia poszczególnych procedur podnoszenia. Opiekun/pielęgniarka są zawsze odpowiedzialni za bezpieczeństwo pacjentów, którymi się zajmują i muszą być świadomi zdolności swoich pacjentów do poradzenia sobie z całą „sytuacją podnoszenia”. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą.


Zakładanie szelek w pozycji leżącej

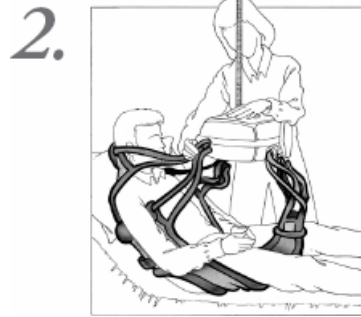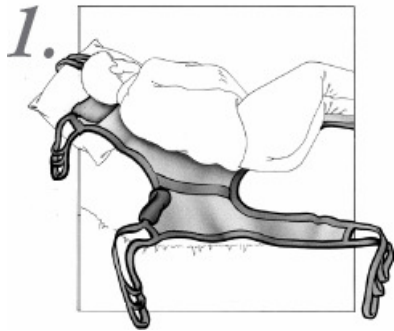

1. Pacjenta połóż na boku. Środek szelek umieść w linii kręgosłupa. Zwróć uwagę na metkę, która umieszczona jest na szelkach (powinna być na zewnątrz). Obróć pacjenta na drugą stronę i wyciągnij szelki. Połóż pacjenta na plecach. Jeżeli łóżko ma regulację oparcia, to ustaw je w pozycji nachylonej.

2. Podciągnij części nożne pomiędzy nogi. Jeżeli pacjent chce się udać do toalety, rozepnij mu spodnie. Obniż kasetę do poziomu brzucha. Możesz poprowadzić lewe części nożne przez paski na zewnątrz prawej części nożnej. Zahacz paski podnoszące nożne na przednim haku kasety. Obróć kasetę i zahacz paski podnoszące tylne na hakach z tyłu kasety. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.


Alternatywa: Szelki można również używać z dwupunktowym systemem zawieszenia. W takim przypadku pasek zewnętrzny prawej części nożnej nie jest używany. Części nożne zostają wtedy skrzyżowane. Czytaj „Zakładanie szelek w pozycji siedzącej”.

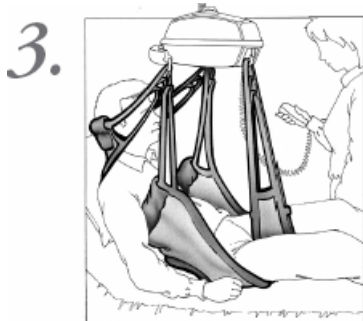

3. Zahacz paski podnoszące szyjne na haki z tyłu kasety. Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.

4. Wznów podnoszenie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nieznacznie opuść łóżko. Delikatnie przytrzymaj nogi pacjenta podczas podnoszenia go z łóżka. Jeżeli pacjent korzysta z toalety, to opuść mu spodnie tak nisko jak tylko się da i delikatnie osadź go na siedzisku. Opuść kasetę do poziomu brzucha i odepnij części nożne. Podnieś kasetę ponad głowę pacjenta i zdejmij mu spodnie.

Zakładanie szelek w pozycji siedzącej

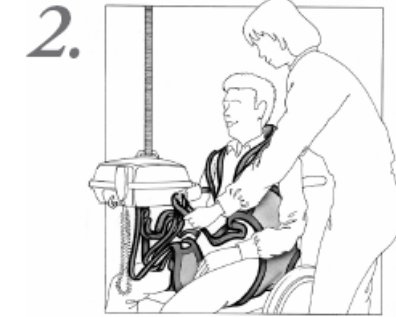

1. Umieść szelki za plecami pacjenta. Zwróć uwagę na metkę, która jest umieszczona na szelkach (powinna być na zewnątrz). Wyciągnij części nożne

2. Podciągnij części nożne pomiędzy nogi. Obniż kasetę do poziomu brzucha. Skrzyżuj paski podnoszące nożne. Zahacz paski części nożnych oraz paski części tylnich na haki z tyłu kasety. Jedną ręką przytrzymaj kasetę z daleka od głowy pacjenta podczas jej podnoszenia.

Alternatywa: Szelki można również używać z trójpunktowym systemem zawieszenia. W takim przypadku paski części nożnych nie są skrzyżowane. Użyj zewnętrzny pasek prawej części nożnej. Czytaj: „Zakładanie szelek w pozycji leżącej.”



3. Zahacz paski podnoszące szyjne na haki z tyłu kasety. Zostań w takiej pozycji i sprawdź czy wszystkie paski są dobrze naciągnięte i znajdują się w odpowiednich pozycjach.

4. Wznów podnoszenie. Jeżeli pacjent korzysta z toalety, to opuść mu spodnie tak nisko jak tylko się da i delikatnie osadź go na siedzisku. Opuść kasetę do poziomu brzucha i odepnij części nożne. Podnieś kasetę ponad głowę pacjenta i zdejmij mu spodnie.