


Szelki Do Transportu W Pozycji Stojącej Human Care 25100 zakłada się, gdy dziecko leży. Zaczynij od wsunięcia nóg przez otwory części nożnych.



Wsuń ramiona dziecka przez boczne otwory, a następnie podciągnij szelki pod szyję tak wysoko jak to możliwe.

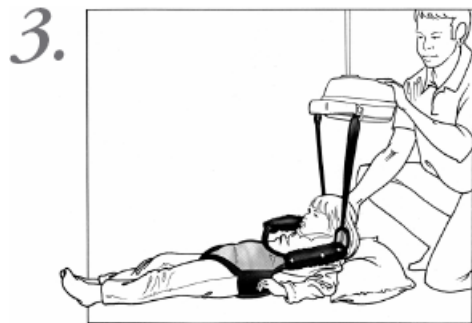

Ustaw dziecko w pozycji stojącej. Podtrzymuj jedną ręką głowę do czasu aż szelki będą maksymalnie napięte. Głowa powinna znajdować się tuż pod górną krawędzią szelek.

Specyfikacja

Materiał: Siatka Poliesterowa
Krawędzie: Poliester
Max. Obciążenie: 100 kg
Pranie: patrz ulotka na szelkach




Rozmiary

JS = 65 cm
JM = 71 cm
JL = 78cm

HUMAN
CARE
Lift

Szelki Do Transportu W Pozycji Stojącej 25100

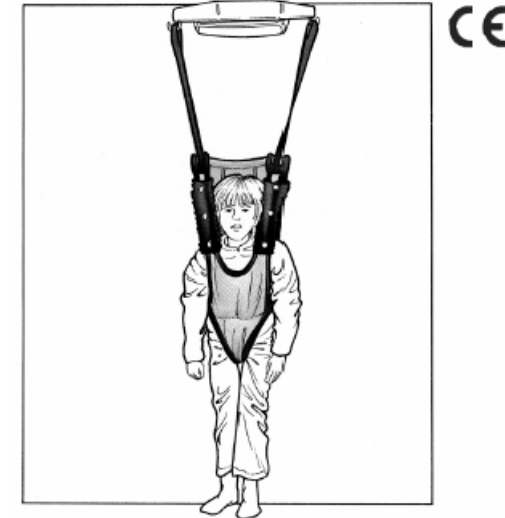

Szelki Do Transportu W Pozycji Stojącej Human Care 25100 daje możliwość podniesienia się i przemieszczania się w pozycji stojącej używając swoich możliwości i umiejętności. Szelki te dostępne są w trzech rozmiarach dziecięcych.

Szelki wykonane są z siatki poliestrowej. Mają one oparcie głowy w kształcie miseczki oraz giętkie opaski po bokach które sprawiają je bardziej elastycznymi.

Szelki 25100 są skonstruowane dla dwupunktowego systemu zawieszenia.

WAŻNE!

⚠ Podnoszenie i przemieszczanie pacjenta zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego też należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi zarówno procedur podnoszenia, jak i sprzętu do podnoszenia. Należy się zawsze upewnić, że używa się właściwego sprzętu do podnoszenia w celu ułatwienia poszczególnych procedur podnoszenia. Opiekun/pielęgniarka są zawsze odpowiedzialni za bezpieczeństwo pacjentów, którymi się zajmują i muszą być świadomi zdolności swoich pacjentów do poradzenia sobie z całą „sytuacją podnoszenia”. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą.

